

24/12/2020

מדריך למשתמש בעמדת אחות ICALL ST290

יחידת האחות מדגם ICALL ST290 הינה המילה האחרונה והמתקדמת במערכות אחות חולה לדייר

היחידה מאפשרת קבלת דיווחים, קריאות והתרעות מדויקים ובזמן אמת, קיצור זמן ההיענות לקריאה, העלאת רמת השרות לדיירים ולצוות הרפואי שיודע כבר מראש על טיבה ומהותה של הקריאה ונערכה אליה בהתאם


להן מדריך למשתמש :

לפני שמתחילים כדאי לדעת כמה דברים נוספים

- היחידה הינה בעלת מסך נגיעה צבעוני מבוססת IP
 - היחידה משמשת גם כטלפון המאפשרת חיוג ושיחה מיידית ללא שפופרות לדייר ומענה לשיחות נכנסות מדירות הדיירים
 - היחידה מאפשרת (בכפוף לחוקי משרד הבריאות) קבלת תמונה ממצלמות המותקנת באתר
 - מידע נוסף ומלא ניתן למצוא באתר הבית שלנו <https://nec-il.co.il/icall>
1. תצוגה במצב אידיאלי או במצב חזרה לשגרה לאחר סיום אירוע:




2. קריאה לעזרה של הדייר בלחיצה של הלחצן הקריאה **Ent** הנמצא בכניסה לכל דירה

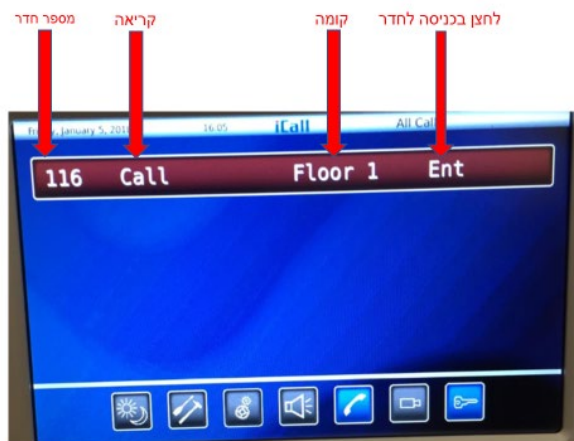

Ent
מסמן על הפעלת
הלחצן בכניסה לחדר

3. האחות נענית לקריאה ומגיעה לחדרו של הדייר ולוחצת על הלחצן **Ent** הירוק הנמצא בכניסה בכל דירה

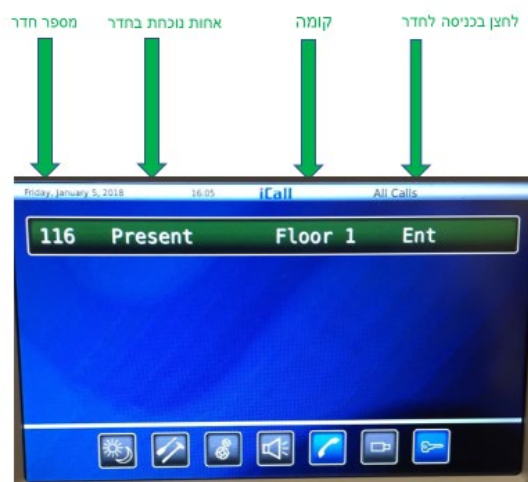

אחות נוכחת בחדר
Ent

Ent
מסמן על הפעלת הלחצן
ע"י האחות בכניסה לחדר

4. קריאה ובקשה לסייע ועזרה נוספת של איש צוות נוסף מופעל ע"י האחות ע"י לחצן האדום בכניסה לחדר או על הלחצן האדום הנמצא ליד מיטת הדייר




בקשה לסייע

Ent

מסמן על בקשת סיוע איש צוות נוסף ע"י האחות בכניסה לחדר

5. נפילה – קריאה לעזרה לאחות ע"י הדייר באמצעות משיכת כבל האדום הנמצא באמבטיה קריאה זו מוגדרת כקריאה בעדיפות ראשונה ובדחיפות גבוהה

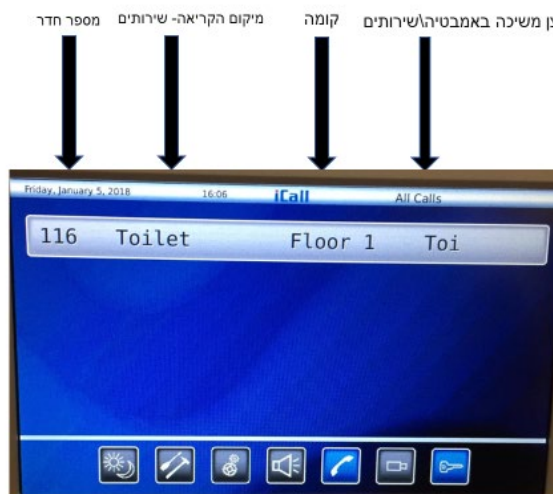


נפילה

Toi

מסמן על הפעלת לחצן משיכה בחדר אמבטיה לשירותים ע"י הדייר אינדיקציה לנפילה

6. נפילה – קריאה ובקשה לסיוע ועזרה נוספת Tol של איש צוות נוסף מופעל ע"י האחות ע"י משיכה נוספת של **הכבל האדום הנמצא בשירותים**

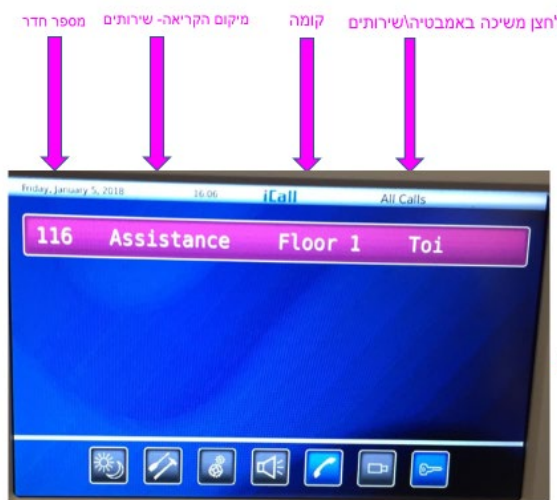


בקשה לסיוע איש צוות נוסף בשירותים

Tol

מסמן על הפעלת לחצן משיכה בחדר אמבטיה /שירותים ע"י האחות בבקשה לסיוע איש צוות נוסף

7. קריאה לעזרה של הדייר בלחיצה של הלחצן הקריאה **האדום Bed** הנמצא בסמוך למיטת הדייר

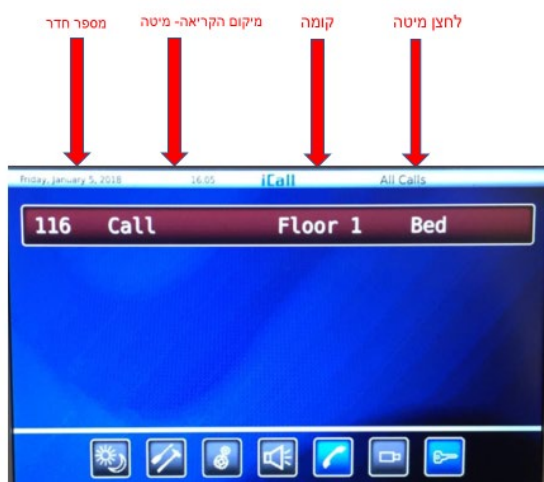

קריאה לעזרה

Bed

מסמן על הפעלת לחצן מיטה ע"י הדייר